



## 呼気スイッチ1 (吹く専用、感度調整付)

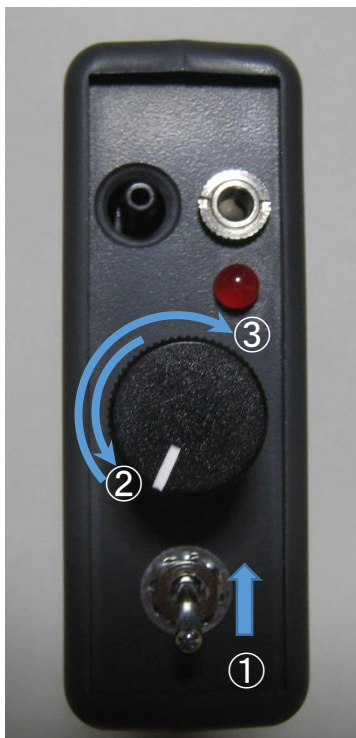

呼気チューブ取付け口  
※同梱のチューブの何も  
ついていない側を差込む

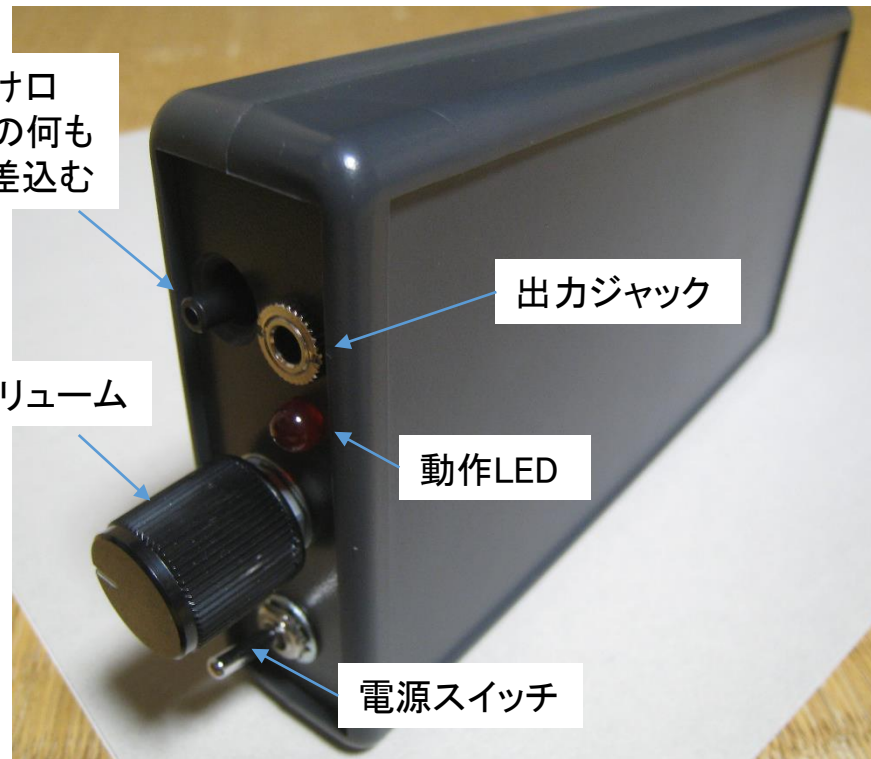

電源の入れ方(①から③が終わるまでは、呼気チューブには息を吹き込まないでください。)

- ①スイッチをON(上側に倒す)します。※使い終わったら忘れずにOFFしてください。
- ②感度調整ボリュームを左側に回し切ります。(白線が7時の位置あたりまで)  
この時、動作LED(赤色)が点灯していることを確認してください。
- ③今度は、右方向にゆっくりと回していくと9時の位置あたりで動作LEDが消灯します。  
この位置から、少し(ボリュームの白線分くらい)右に回します。
- ④呼気チューブをくわえ、ほんの軽く息を吹き込むだけでLEDが点灯することを確認します。  
※使用時の呼気の強さに応じて、10時から5時の範囲で、感度を調整します。  
右に回すほど、動作LEDを点灯させるには強い息の吹き込みが必要になります。
- ⑤両端がプラグのコードの片側を、前面の出力ジャックに、もう一方を操作したいおもちゃなどに接続します。  
息を吹き込んでいる間、動作LEDが点灯、スイッチがオンになり、おもちゃなどが動きます。

## 呼気スイッチ2(「吸う」、「吹く」切替、感度調整なし)



「吸う」、「吹く」の切替(一度設定すると、状態を覚えているので毎回設定する必要はありません。)

- ①呼気チューブを取付けます。
- ②呼気チューブをくわえて、息を【吹き込み/吸い込み】ながら、スイッチをONします。
- ③息を【吹き込こんだ/吸い込んだ】まま、約2秒間待って、チューブを口から外し、5秒ほど待ってください。
- ④息を吹き込みながらONした場合は、吹くスイッチに、吸い込みながらONした場合は吸うスイッチに設定されます。
- ⑤両端がプラグのコードの片側を、前面の出力ジャックに、もう一方を操作したいおもちゃなどに接続します。  
息を【吹き込んで/吸い込んで】いる間、動作LEDが点灯、スイッチがオンになり、おもちゃなどが動きます。  
※使い終わったら忘れずに電源スイッチをOFFしてください。